



Vor der Verwendung dieses Autoklaven bitte das Benutzerhandbuch lesen.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

1 Einheit einschalten

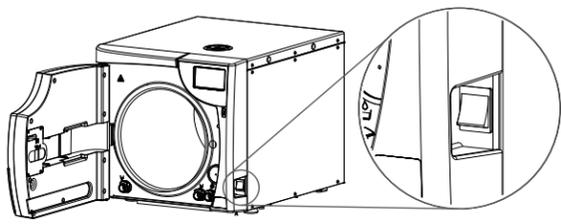


2 Mit vollentsalztem/destilliertem Wasser befüllen

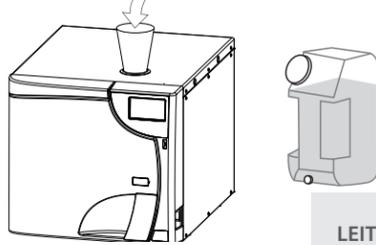


NIEMALS LEITUNGSWASSER VERWENDEN

3 Konfigurationen für das Beladen

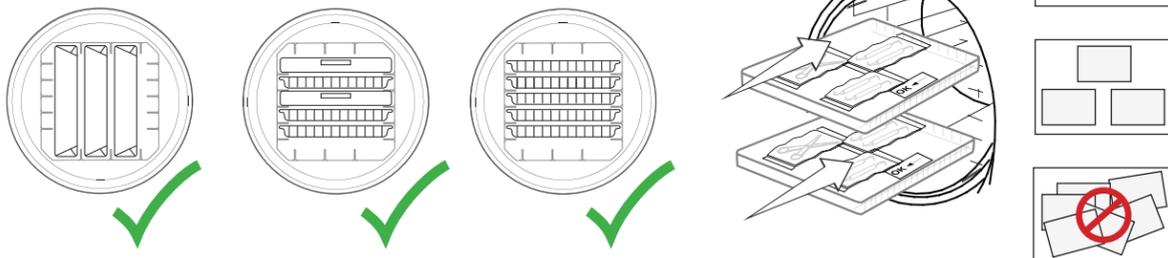

4 Einheit schließen

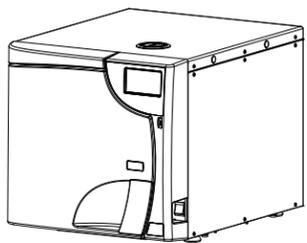


5 Zyklus ausführen

Wählen Sie einen Zyklus aus.


Starten Sie einen Zyklus.

Zyklusende


6 Einheit öffnen

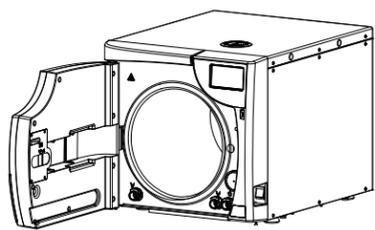


7 Instrumente entnehmen

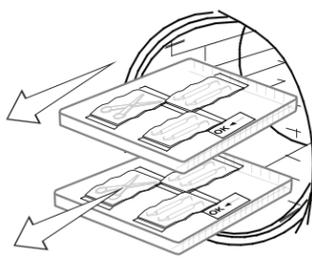


8 Bei Bedarf manuell entleeren

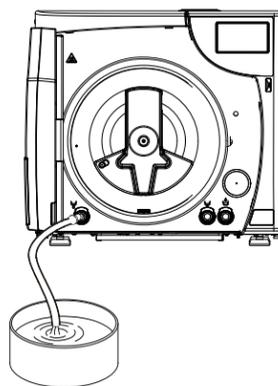


TOUCHSCREEN

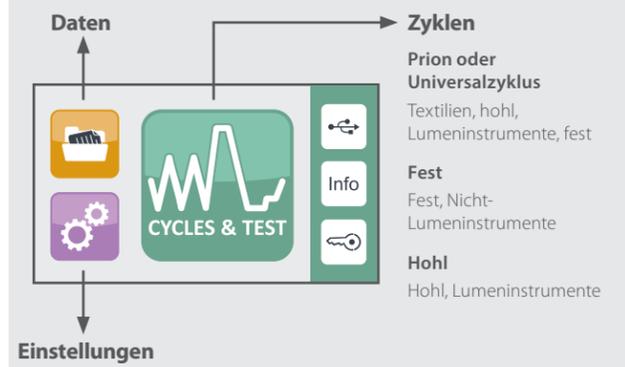


BELÜFTUNG

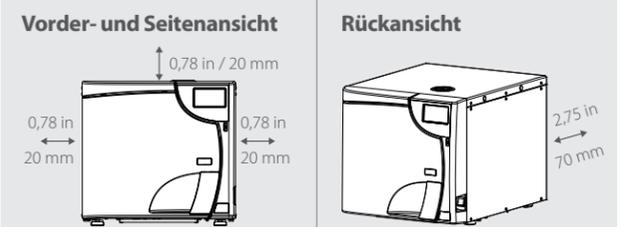

FÜLLOPTIIONEN

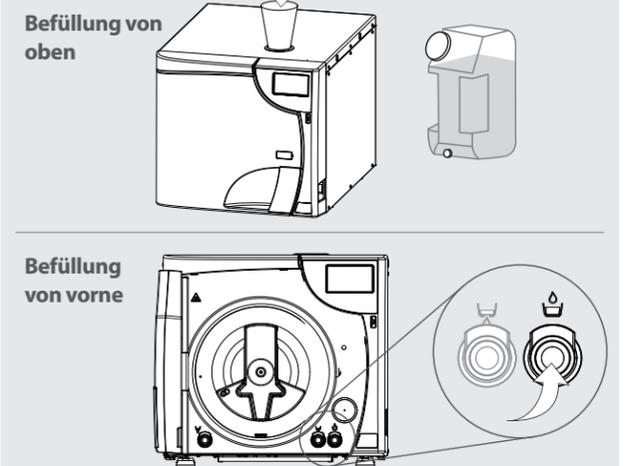

ENTLEERUNGSOPTIONEN

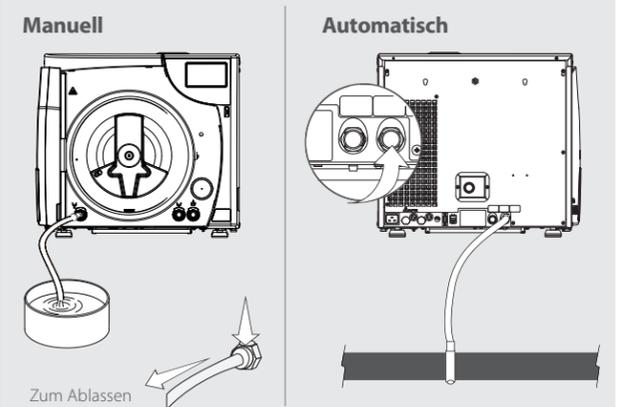

WARTUNGSPLAN

Täglich	Reinigen Sie die Türdichtung und die Innenseite der Tür mit einem sauberen, feuchten Tuch. Auf Verschleiß prüfen und bei Bedarf ersetzen.
	Leeren Sie den Abwassertank vor dem Wiederauffüllen des Wasserreservoirs vollständig.
Wöchentlich	Reinigen Sie die Kammer und entsprechendes Zubehör mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein neutrales Reinigungsmittel (ohne Basen und Bleichmittel). Sorgfältig mit vollentsalztem/destilliertem Wasser spülen und alle Rückstände entfernen.
	Inspizieren und reinigen Sie den Staubschutz-Kammerfilter . Gegebenenfalls ersetzen.
	Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den BRAVO G4 staubfrei ist.
Monatlich	Entleeren und reinigen Sie den internen Wassertank gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
	Wird ein externer Wassertank , zur automatische Befüllung verwendet, reinigen Sie diesen ebenfalls.

	Prüfen Sie den bakteriologischen Filter und ersetzen Sie diesen bei Bedarf.
	Schmieren Sie die Türverriegelung . Entfernen Sie mit einem sauberen Tuch alle Rückstände und schmieren Sie die Innenseite der Buchse mit einer Schicht des mitgelieferten silikonbasierten Schmiermittels.
Alle 3-6 Monate	Kontrollieren und reinigen Sie die Ablassfilter .
	Bei Bedarf ersetzen.
Jährlich oder alle 1.000 Zyklen	Ersetzen Sie die Türdichtung .

Ersatzteile und Zubehör

97400145	Türdichtung (17 l/22 l)
97467176	Türdichtung (28 l)
97290160	Bakteriologischer Filter
97290210	Staubschutz-Kammerfilter
99950390	Instrumententräger 17 l
99950317	Instrumententräger 22 l
99951041	Instrumententräger 28 l
99950394	Beutelträger
99951317	Einsatz 17 l
99951318	Einsatz 22 l
99951042	Einsatz 28 l
97467066	Einsatz-Ausziehvorrichtung

ACHTUNG!

Anwender dieses Geräts müssen sicherstellen, dass der gemäß den Empfehlungen der maßgeblichen Behörden für Infektionsschutz und den vor Ort geltenden gesetzlichen Richtlinien/Empfehlungen am besten geeignete Sterilisationszyklus gewählt wurde.