




SciCan OPTIM 1

Valiklis ir dezinfektantas viename

Veiklioji medžiaga: **vandenilio peroksidas, 0,5 %**

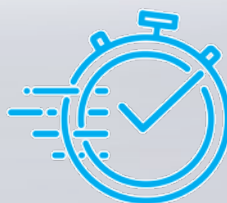

1 Sąlyčio laikas
MINUTĖ

Greitai veikiantis ir švelnus

Naudojant OPTIM 1 nereikia rinktis tarp efektyvumo ir apsaugos. Tai yra vienas greičiausiai ir efektyviausiai veikiančių valiklių-dezinfektantų - per trumpą sąlyčio laiką pasiekama plataus spektro dezinfekcija. Be to, jis saugus ir švelnus jūsų odai bei paviršiams. OPTIM 1 suteikia pasitikėjimo, kad laikotės taisyklių ir saugote savo pacientus, darbuotojus bei aplinką.



Greitai veikiantis plataus poveikio dezinfektantas

Siekiant užtikrinti dezinfekciją, paviršiai turi likti šlapi visą sąlyčio laiką.

- › Adenovirusas, poliomielito virusas, murino norovirusas vos per 30 sekundžių pagal standartą EN 14476
- › Tuberkulicidinis ir fungicidinis poveikis per 1 minutę
- › Baktericidinis ir virucidinis poveikis per 30 sekundžių pagal standartą EN 13727 ir EN 14476
- › Visiškai sunaikina virusus per 2 minutes pagal standartą RKI/DVV (poliomielito virusas, adenovirusas, murino norovirusas, SV40)
- › Poveikis pasireiškia per 1 minutę pagal standartą EN 16615
- › Puikiai drėkina – išlieka drėgnas pakankamai ilgai, taip užtikrinamas pakankamas sąlyčio laikas



Suderintas

Tinka pačioms įvairiausioms kietoms, neporėtoms medžiagoms ir paviršiams.



Saugus ir švelnus

- › Be dirbtinių kvapų
- › Netoksiškas
- › Nedirgina odos, akių ir kvėpavimo takų sistemos
- › Nėra GHS pavojaus piktogramų, signalinių žodžių ar frazių
- › Nepalieka aktyvių likučių; nedidina antimikrobinio atsparumo



Palankus aplinkai

Veiklioji medžiaga vandenilio peroksidas skyla į vandenį ir deguonį, todėl nelieka aktyvių likučių, kurie daro neigiamą poveikį aplinkai.



Efektyvus valiklis ir dezinfektantas viename

Dezinfekcijos metu efektyviai pašalina organines apnašas.

COLTENE

* Poveikis pasireiškia per 1 minutę pagal Europos standartus; EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 16615 (žr. kitą pusę).
Pagal Vokietijoje privalomą standartą RKI/DVV OPTIM 1 IŠNAIKINA VISUS VIRUSUS per 2 minutes.



Trumpas sąlyčio laikas

Įrodyta, kad OPTIM 1 turi puikias naikinimo savybes; trumpesnis sąlyčio laikas užtikrina atitikimą reikalavimams ir suteikia pasitikėjimo, kad dezinfekcija įvyko.

Įrodyta, kad OPTIM 1 yra efektyvus naikinant tokius sunkiai išnaikinamus patogenus kaip adenovirusas, poliomielito virusas ir murino norovirusas; tai jums užtikrina, kad apsaugote savo patalpas nuo patogenų.

OPTIM 1 Efektyvumas ir naudojimo rekomendacijos

Mechaninis paviršių dezinfekavimas	STANDARTAS	BANDYMO ORGANIZMAI	SĄLYČIO LAIKAS [†]	UŽTERŠTUMO SĄLYGOS	TEMPERATŪRA	NAUDOJAMA KONCENTRACIJA
Virucidinis	EN 14476	1-ojo tipo poliovirusas, 5-ojo tipo adenovirusas, pelių norovirusas S99 Berlin	30 sek.	Užterštumo sąlygos	Patalpos temperatūra	Neskiestas
Visiškai virucidinis (tik vokiškai)*	Robert Koch instituto rekomendacija, Bundesgesundheitsblatt (Federalinis sveikatos leidinys) 01/2004	1-ojo tipo poliovirusas, 5-ojo tipo adenovirusas, pelių norovirusas S99 Berlin, beždžionės poliomos virusas SV-40	2 min.	Užterštumo sąlygos	Patalpos temperatūra	Neskiestas
* IŠNAIKINA VISUS VIRUSUS reiškia, kad dezinfekantas gali nuslopinti apvalkalėtuosius ir neapvalkalėtuosius virusus pagal Vokietijos DVV bandymų standartus. Siekiant pateikti pareiškimą apie tai, kad priemonė naikina visus virusus, dezinfekantas turi nuslopinti adenovirusą, poliomielito virusą, SV40 ir murino norovirusą.						
Baktericidinis	EN 13727,	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae,	30 sek.	Užterštumo sąlygos	Patalpos temperatūra	Neskiestas
	EN 16615**	Psuedomonas aeruginosa	1 min.	Užterštumo sąlygos	Patalpos temperatūra	Neskiestas
Mechaninis baktericidinis paviršių dezinfekavimas ** Apribojimai / suvaržymai – išbandyta pagal EN 16615: Taikoma tik šluostėms, prekės numeris SCI33R18 / SCI33R18XL. OPTIM skysčiui naudokite tik SciCan sausas šluostes, prekės numeris SCI33R18 / SCI33R18XL.						
Tuberkulicidinis / mikobaktericidinis	EN 14348	Mycobacterium terrae	1 min.	Užterštumo sąlygos	Patalpos temperatūra	Neskiestas
Fungicidinis	EN 13624	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	1 min.	Užterštumo sąlygos	Patalpos temperatūra	Neskiestas
Mielicidinis	EN 13624, EN 16615**	Candida albicans	1 min.	Užterštumo sąlygos	Patalpos temperatūra	Neskiestas

Mechaninis mielicidinis paviršių dezinfekavimas

** Apribojimai / suvaržymai – išbandyta pagal EN 16615: Taikoma tik šluostėms, prekės numeris SCI33R18 / SCI33R18XL. OPTIM skysčiui naudokite tik SciCan sausas šluostes, prekės numeris SCI33R18 / SCI33R18XL.

[†] Nuvalykite paviršių ir užtikrinkite, kad paviršius išliks drėgnas visą sąlyčio laiką.

Valymo veiksmingumas

Vieno veiksmo valiklis

Sauga

GHS privalomos pavojaus piktogramos

Nereikia

Nedirgina akių

Taip

Nedirgina odos

Taip

OPTIM 1 užsakymo informacija

Paruoštos naudoti drėgnosios servetėlės

OPTEU1-12W RTU servetėlės 15 x 18 cm (12 x 160 lapelių dėžutėje)

Skystis

OPTEU1-4x4 1 dėžutė su 4 x 4 litrais

Priedai

FND30 dozatoriaus pompa 1 galono buteliui



Coltène/Whaledent GmbH+Co. KG
Raiffeisenstraße 30
DE-89129 Langenau