




SciCan OPTIM 1

ENSTEGSRENGÖRINGS- OCH DESINFEKTIONSMEDEL

Aktiva ingredienser: **0,5 % väteperoxid**

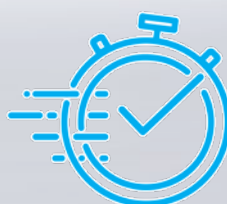

1 MINUT KONTAKTTID*

Snabbt och skonsamt

Med OPTIM 1 behöver du inte kompromissa mellan att arbeta effektivt och att vara skyddad. Med sin snabba bredspektrala kontakttid är det ett av de snabbast verkande och mest effektiva rengörings- och desinfektionsmedlen. Det är dessutom säkert att använda och skonsamt för dig och för ytor. Skapa en perfekt balans – med OPTIM 1 kan du vara säker på att du följer tillämpliga standarder och skyddar dina patienter, din personal och miljön.



Snabbt desinfektionsmedel med brett spektrum

Ytorna måste förbli våta under hela kontakttiden för att desinfektion ska kunna ske.

- › Verkar på adeno-, polio- och murint norovirus på bara 30 sekunder i enlighet med EN 14476
- › Tuberkulocid och fungicid effekt på 1 minut
- › Baktericid och virucid effekt på 30 sekunder i enlighet med EN 13727 och EN 14476
- › Full virucid effekt på 2 minuter i enlighet med RKI/DVV-standarderna (polio-, adeno-, murint norovirus, SV40)
- › Effektivt på 1 minut i enlighet med EN 16615
- › Utmärkt vätkarhet – förblir våt under hela kontakttiden



Effektiv enstegsrengöring

Ett effektivt enstegsrengörings- och desinfektionsmedel avlägsnar organiska föroreningar samtidigt som det desinficerar.



Kompatibelt

Kompatibelt med ett stort antal hårda, icke-porösa material och ytor.



Snabbt och skonsamt

- › Fritt från artificiella doftämnen
- › Giftfritt
- › Icke-irriterande för hud, ögon och andningsorgan
- › Inga GHS-faropiktogram, signalord eller faroangivelser
- › Efterlämnar inga aktiva rester, bidrar inte till antimikrobiell resistens



Miljövänligt

Den aktiva ingrediensen väteperoxid bryts ned till vatten och syre och efterlämnar inga aktiva rester vilket minskar miljöpåverkan.

 **COLTENE**

* Verkar inom 1 minut i enlighet med de europeiska standarderna: EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 16615 (se baksida).
Enligt kraven i den tyska standarden RKI/DVV är OPTIM 1 FULLT VIRUCID inom 2 minuter.



Korta kontakttider

OPTIM 1 har bevisats ha överlägsna egenskaper. Jämna kontakttider är kortare vilket säkerställer att tillämpliga standarder följs. Samtidigt skapas förtroende för att desinfektion har uppnåtts.

OPTIM 1 har bevisats vara effektiv mot sjukdomsalstrande virus som är svåra att döda, såsom adeno-, polio- och murint norovirus. Detta gör att du kan vara säker på att din anläggning skyddas mot oroväckande patogener.

OPTIM 1 Påståenden om effekt och användningsrekommendationer

Ytdesinfektion med mekaniska åtgärder	STANDARD	TESTORGANISMER	KONTAKTTID [†]	SMUTSFÖRHÅLLANDEN	TEMPERATUR	KONCENTRATION
Virusdödande	EN 14476	Poliovirus typ 1, adenovirus typ 5, murine norovirus stam S99 Berlin	30 sek	Smutsiga förhållanden	Rumstemperatur	Outspädd
Helt virusdödande (endast Tyskland)*	RKI-rekommendation, Bundesgesundheitsblatt (förbundsmyndighetens för hälsovård tidning) 01/2004	Poliovirus typ 1, adenovirus typ 5, murine norovirus stam S99 Berlin, polyomavirus SV-40	2 min	Smutsiga förhållanden	Rumstemperatur	Outspädd
Bakteriedödande	EN 13727,	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae,	30 sek.	Smutsiga förhållanden	Rumstemperatur	Outspädd
	EN 16615**	Pseudomonas aeruginosa	1 min.	Smutsiga förhållanden	Rumstemperatur	Outspädd
Tuberkulocid/ Mykobaktericid	EN 14348	Mycobacterium terrae	1 min.	Smutsiga förhållanden	Rumstemperatur	Outspädd
Svampdödande	EN 13624	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	1 min.	Smutsiga förhållanden	Rumstemperatur	Outspädd
Jästdödande	EN 13624, EN 16615**	Candida albicans	1 min.	Smutsiga förhållanden	Rumstemperatur	Outspädd

Jästdödande Ytdesinfektion med mekaniska åtgärder:

**Begränsningar/Restriktioner – Test enligt EN 16615: Gäller endast servetter med artikelnummer SCI33R18 / SCI33R18XL. Endast SciCan torra servetter med artikelnummer SCI33R18 / SCI33R18XL ska användas med OPTIM-vätskan.

[†] Torka av ytan och se till att ytan hålls fuktig under hela kontakttiden.

Rengöringseffektivitet

Enstegsrengöring

Säkerhet

Farosymboler enligt GHS-kraven

Ingen krävs

Icke-irriterande för ögon

Ja

Icke-irriterande för hud

Ja

Beställningsinformation för OPTIM 1

Användningsklara förfuktade servetter

OPTEU1-12W Användningsklara servetter 15 x 18 cm (12 x 160 ark/ask)

Vätska

OPTEU1-4x4 1 låda med 4 x 4 liter

Tillbehör

FND30 Pump för 1 stor flaska



Coltène/Whaledent GmbH+Co. KG
Raiffeisenstraße 30
DE-89129 Langenau