

# STATMATIC™



STATMATIC  
S30000

## EL SISTEMA DE LIMPIEZA DEFINITIVO para 3 piezas de mano y sus cabezales

STATMATIC es el sistema de limpieza y mantenimiento automático que lubrica y purga correctamente hasta 3 piezas de mano antes de su esterilización. STATMATIC incorpora además un mantenimiento único del cabezal para eliminar los residuos dentro del mismo. Usted y su personal se beneficiarán de una mayor eficiencia, un menor número de reparaciones y una mayor durabilidad de sus piezas de mano.



### Aumenta la vida útil de sus piezas de mano

Lubrica y purga correctamente sus piezas de mano para prolongar su vida útil.



### Optimiza la productividad del personal

Su proceso automatizado optimiza los procedimientos de trabajo de su clínica, permitiendo a su personal centrarse en otras tareas.



### Ahorro de tiempo

Pueden lubricarse y purgarse hasta 3 piezas de mano en menos de 2 minutos.



SciCan

[www.scican.com](http://www.scican.com)

# Una mayor vida útil para sus piezas de mano

gracias a una purga y lubricación eficientes, ahorrándole tiempo y dinero.



STATMATIC es el sistema de limpieza y mantenimiento automático para hasta 3 instrumentos de su elección y sus cabezales.

STATMATIC optimiza los procedimientos de trabajo en su clínica y desempeña un papel importante en la protección y el mantenimiento de su valioso instrumental.

## Uno, dos o tres. STATMATIC se encarga.



## Rápido y a fondo

- › Purga y mantiene automáticamente hasta tres piezas de mano.
- › Ciclos de tan solo 30 segundos por pieza de mano.
- › Sistema único para la limpieza del cabezal.
- › Cobertura óptima del lubricante en toda la pieza de mano.
- › Conexión de aire comprimido: purga del exceso de lubricante.
- › Calidad del mantenimiento reproducible automatizada.
- › Inserción sencilla del spray.
- › Acoplamiento del spray con una válvula de seguridad única.
- › Almohadilla de absorción para el exceso de lubricante.
- › 3 años de garantía - Solo de SciCan.



### Cambio del spray

Es muy sencillo: empuje hacia arriba el anillo de retención, encaje el spray en su lugar y vuelva a bajar el anillo de retención.

N.º de prod. STM500-EU



### Cambio de la almohadilla de absorción

Limpio como una patena: STATMATIC está equipado con una almohadilla de absorción para retener cualquier exceso de lubricante.

N.º de prod. S30102



### Válvula de seguridad

Seguridad absoluta: la válvula de seguridad automática solo se abrirá cuando se haya activado un programa de cuidado.



### Limpieza del cabezal:

¡Coloque el cabezal en posición, pulse el botón y listo!

## Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	Peso	Valores eléctricos	Clase de protección	Temperatura ambiente	Nivel de sonido	Humedad relativa	Aire comprimido	Consumo de aire	Calidad del aire comprimido	Duración del ciclo
285 x 190 x 400 mm (11,4 x 7,6 x 16 pulgadas)	8,6 kg 18,9 lb	Tensión nominal: 100-230 V Frecuencia nominal: 50/60 Hz Potencia nominal: máx. 30 VA	1	5-40 °C (41-104 °F)	60 (65) dB (A)	máx. 85 %	4-6 bar (58-87 psi)	40 NL/min	Contenido de aceite residual: máx. 0,1 mg/m <sup>3</sup> Polvo residual: máx. 1 µ; máx. 1 mg/m <sup>3</sup> Agua residual: máx. 0,1 g/m <sup>3</sup> a -40 °C	Tiempo de prepurga de 15 segundos (estándar) más tiempo de lubricación, el cual puede ajustarse entre 15, 20, 30 y 40 segundos

Fabricado por:  
**SciCan Ltd.**  
1440 Don Mills Road,  
Toronto, ON M3B 3P9  
Tel: (416) 445-1600  
Fax: (416) 445-2727  
Llamada gratuita: 1-800-667-7733  
customerservice@scican.com



Representante de la UE:  
**SciCan GmbH**  
Wangener Strasse 78  
88299 Leutkirch  
Alemania  
Tel.: +49 (0)7561 98343 - 0  
Fax: +49 (0)7561 98343 - 699  
customerservice\_eu@scican.com

Cientes suizos:  
**SciCan Medtech AG**  
Alpenstrasse 14  
6300 Zug  
Suiza  
Tel.: +41 (0) 41-727 7027  
Fax: +41 (0) 41-727 7029 Oficina para  
clientes suizos:

### 3 AÑOS DE GARANTÍA:

Diseño en acero inoxidable de la máxima calidad, larga vida útil: puede confiar en STATMATIC.  
Calidad - Made in Germany.

**SciCan**

www.scican.com