

# AutoFill™ VistaPure™

## En mode mains libres!

Les accessoires AutoFill brevetés de VistaPure permettent de réapprovisionner automatiquement les autoclaves STATIM® et BRAVO<sup>MC</sup> de SciCan en eau de qualité distillée—plus aucun besoin de les remplir manuellement!

Les trousse d'accessoires AutoFill de VistaPure sont compatibles avec tous les systèmes VistaPure et peuvent être installées facilement sur tout modèle d'autoclave STATIM 2000 / G4, 5000 / G4, ou BRAVO, en quelques minutes seulement!



- ✓ Plus besoin d'acheter ni d'entreposer d'eau distillée
- ✓ Plus de défaillances de cycle causées par un oubli de remplir les réservoirs

- ✓ Plus de dégâts causés par un remplissage manuel
- ✓ Plus de pertes de temps à remplir les autoclaves = plus de temps pour les patients

AutoFill pour STATIM  
(S3020)

AutoFill pour BRAVO  
(S3030)




# Installation de l'AutoFill VistaPure Installation

Un tube transparent de 12 pieds en polyuréthane est déjà raccordé au collecteur AutoFill. Si la distance qui relie le VistaPure et l'autoclave est supérieure à 12 pieds, commandez simplement un tube transparent en polyuréthane plus long; la distance entre le VistaPure et l'autoclave n'est pas limitée, sauf par la longueur du tube.

## Installation de l'AutoFill sur un STATIM

L'AutoFill VistaPure pour STATIM (S3020) peut être installé sur tout nouveau ou ancien modèle d'autoclave STATIM 2000 ou 5000 comme suit :

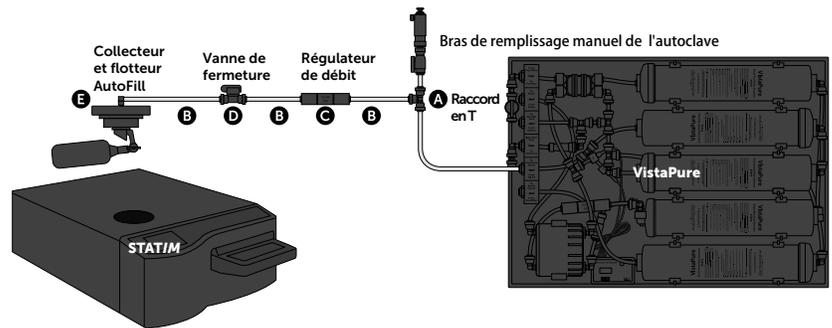


## Installation de l'AutoFill sur un BRAVO

L'AutoFill VistaPure pour BRAVO (S3030) peut être installé sur tout modèle d'autoclave BRAVO.


### Utilisation du petit réservoir du BRAVO :

Pour raccorder l'AutoFill VistaPure au BRAVO, l'un des deux réservoirs fournis avec le BRAVO doit être sélectionné comme « réservoir de relais », car le BRAVO utilise une pompe d'aspiration pour remplir son réservoir lorsqu'il est réglé en mode de remplissage automatique. Notez que le réservoir de relais doit se trouver à un maximum de 6 pieds du BRAVO en raison de la capacité d'aspiration de la pompe de l'appareil.

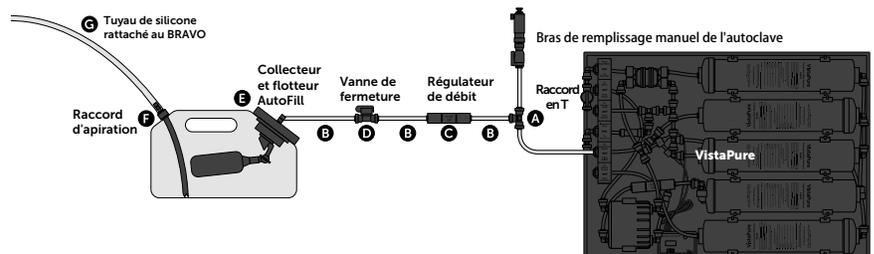

### Utilisation du grand réservoir du BRAVO

**NOTE :** Si vous utilisez le grand réservoir du BRAVO comme réservoir de relais, vous devez installer la tige rallonge entre le collecteur et le flotteur.

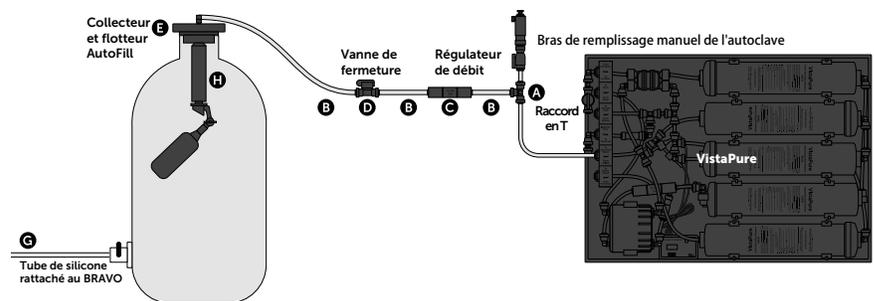

Distribué par :

**SciCan Itée**  
1440 Don Mills Rd  
Toronto, ON M3B 3P9  
CANADA

Sans frais 800-667-7733  
Téléphone 416-445-1600  
Télécopieur 416-445-2727  
customerservice@scican.com

Fabriqué par :

**Vista Research Group**  
PO Box 321  
Ashland, Ohio 44805-0321  
USA

Téléphone 419-285-3927  
VistaResearchGroup.com